

Anleitung zur Gewinnung einer Speichelprobe (Quantisal® Speichelsammelsystem)

Bitte stellen Sie vor der Entnahme sicher, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum des Quantisal® Speichelsammlers nicht überschritten ist. Zudem sollte der Proband seit mindestens 10 Minuten weder gegessen noch etwas getrunken haben und auch nicht geraucht oder Medikamente eingenommen haben, d. h. keine Substanzaufnahme durch den Mund oder die Nase.




1 Das Sammelpad einige Minuten bei geschlossenem Mund unter der Zunge platzieren. Auf dem Pad weder kauen, daran saugen, noch vorzeitig aus dem Mund nehmen.



2 Der Indikator des Sammel pads färbt sich blau, sobald 1 ml ($\pm 10\%$) Speichel aufgenommen wurde. Das Sammel pad daraufhin aus dem Mund entfernen.



3 Den Sammelbehälter mit der Pufferlösung vorsichtig öffnen und das Pad mit dem dünnen Ende von unten in die Verschlusskappe stecken.

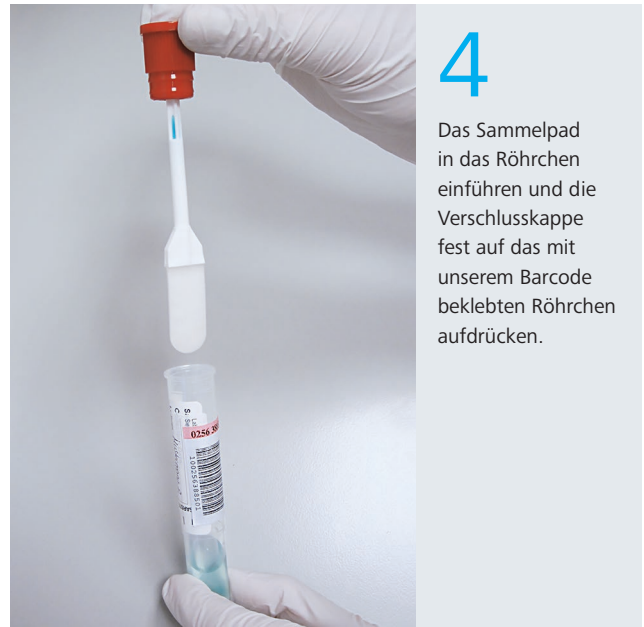

4 Das Sammel pad in das Röhrchen einführen und die Verschlusskappe fest auf das mit unserem Barcode beklebten Röhrchen aufdrücken.

Den Sammelbehälter in ein Transportröhrchen legen und zusammen mit dem ausgefüllten sowie mit unserem Barcode versehenen Anforderungsschein in eine Versandtasche geben. **Achtung: Die Pufferlösung nicht in den Mund nehmen!**

Weitere Hinweise

Bei forensischer Fragestellung ist die Probenahme nach Identitätsprüfung unmittelbar vor der Probenahme und unter direkter Aufsicht durch die entnehmende Institution durchzuführen, um etwaige Manipulationen ausschließen zu können.

Die Speichelprobe wird nach Probeneingang im Probenarchiv 18 Monate tiefgekühlt aufbewahrt.